

# U87E

## เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ DEKAY-U87E


ใช้งานง่าย ตัวเลขใหญ่ แสดงค่าความดันโลหิต ชีพจร และตรวจจับภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ



แสดงเวลา/วัน/เดือน/ปี  
ที่ทำการวัด



บันทึกข้อมูลได้  
2 x 90 ค่า

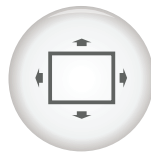


หน้าจอ LCD  
ขนาดใหญ่



แสดงค่าเฉลี่ย  
3 ค่าล่าสุด




ระบบปิดหน้าจอ  
อัตโนมัติ

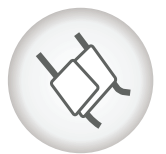


คัพขนาดใหญ  
22-42 cm


### ใช้งานง่าย

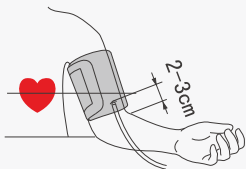

**Step 1**  
พันคัพที่ต้นแขน  
ด้านซ้าย

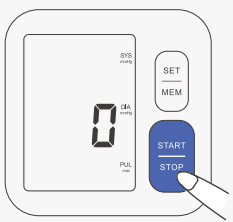

**Step 2**  
กดปุ่ม start / stop  
เพื่อทำการวัด ค่าที่วัด  
ได้จะแสดงที่หน้าจอ  
อัตโนมัติ

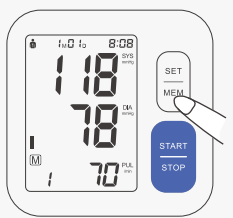

**Step 3**  
มือต้องการดูข้อมูล  
ย้อนหลัง กดปุ่ม MEM

### คุณลักษณะเฉพาะ:

หลักการตรวจวัด	Oscillometric method
แสดงผล	ความดันบน ความดันล่าง ชีพจร ค่าเฉลี่ย 3 ค่าล่าสุด และสัญลักษณ์ หัวใจเต้นผิดปกติ
ช่วงในการวัด	ความดัน 0-299 มิลลิเมตรปรอท / ชีพจร 40-199 ครั้งต่อนาที
ความแม่นยำในการวัด	ความดัน + 3 มิลลิเมตรปรอท / ชีพจร + 5 %
หน้าจอแสดงผล	หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่
หน่วยความจำ	ชนิด DUO Memory บันทึกค่าการวัดได้ 2x90 ค่า
ขนาดเครื่อง	110 X 110 X 45 มิลลิเมตร
น้ำหนักเครื่อง	ประมาณ 230 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)
แบตเตอรี่	ถ่านอัลคาไลน์ 4 x AAA
ระบบประหยัดพลังงาน	เครื่องจะปิดอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน ภายใน 3 นาที